

# Casus ALHYDRAN:

## Nazorg soft chirurgie behandeling

### 1. Beschrijving casus

leeftijd patiënt	54 jaar
geslacht	vrouw
oorzaak	soft chirurgie behandeling t.b.v. huidversteving en rimpelvermindering
behandeling	behandeling met PlexR
therapie nazorg	- direct na PlexR behandeling, start met ALHYDRAN (2 à 3 maal daags) - eerste 4 dagen de huid licht koelen (niet nat maken) - na 4 dagen deppen (niet wrijven)

### 2. Ontwikkeling van de huid



Voor de behandeling



Direct na de behandeling, start ALHYDRAN



2 dagen na behandeling, korstvorming



6 dagen na behandeling - rode huid zonder korsten



1 maand na behandeling - licht rode huid



5 weken na behandeling - volledig hersteld

### 3. Conclusies medisch team

Wij voeren in onze kliniek een aantal esthetische ingrepen uit met behulp van een PlexR. Dit zorgt middels hoogenergetisch plasma voor het verbranden van de huid en huidcontractie. Nabehandeling vindt plaats met Alhydran®.

- Wondgenezing verloopt sneller. Met name de periode van roodheid na de behandeling wordt aanzienlijk verkort
- Veel minder hyperpigmentatie
- Herstel verloopt voorspoediger dan met waterige producten. Een waterige crème zorgt ervoor dat korstjes te snel loslaten.
- De wondgenezing is vrijwel zonder littekens
- Sterke vermindering van jeukklachten na de behandeling

### 4. Ervaring van de patiënt

- Alhydran is gemakkelijk aan te brengen (smeert goed uit en trekt snel in)
- Snel voelbaar en zichtbaar herstel
- Soepele huid na behandeling

Casus: MD E.R. Berends, Kliniek Perfect Look, Westerbork, Nederland